

eka-Lpt Lagerungskissen mit Nässeschutzbezug

REINIGUNG

mittels Wischdesinfektion:

Um die Produkteigenschaften des Materials weiter sicherzustellen, empfehlen wir für die Wischdesinfektion folgende Produkte:

Dimozon pur 4%
Formaldehyd 30%
Incidin Plus 2%
Acryl-des 100
Descogen 10%
Mikrozid AF liquide 100%
Perform 6%
TPH protect 4%

Gehen Sie bei der Wischdesinfektion wie folgt vor:

Produkt mit der Wischdesinfektion einsprühen bzw. mit Lappen auftragen und trocknen lassen.

Beachten Sie hierzu bitte die Herstellerhinweise!

Weiter Reinigungsanweisungen entnehmen Sie bitte dem Annäher am Produkt.